

# SARS-CoV-2 test

BD's testkit för snabbtest av SARS-CoV-2

Det enkla snabbtestet som ger SARS-CoV-2 resultat inom 15 minuter




# Förbered för SARS-CoV-2 testning


När din patient behöver ett tillförlitlig snabbtest för SARS-CoV-2, använd BD's snabbtest för SARS-CoV-2. Ett patientnära snabbtest som är enkel att använda med resultat inom 15minuter.

## Ett resultat<sup>1</sup>

- Analysresultat är utformat för att läsas visuellt
- För användning hos både asymptomatiska och symtomatiska individer som misstänks för SARS-CoV-2-infektion av sin vårdgivare
- Resultat inom bara 15 minuter
- Lättanvänd och avläst av vårdpersonal eller utbildade användare
- Detektion av SARS-CoV-2-antigen (nukleokapsidprotein) med tops från näsan
- Tillförlitliga resultat, 91% PPA\* jämfört med referens PCR metod

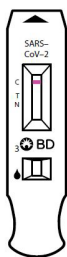

Bara kontrollinje=  
Negativt resultat

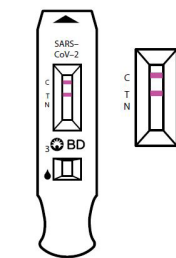

Kontrollinje och Testlinje =  
Positivt resultat

1. BD's snabbtestkit för SARS-CoV-2 [bipacksedel]. Franklin Lakes, NJ: Becton, Dickinson and Company; 2021

\* Klinisk test data inhämtat från Studie 1 i bipacksedel. Prestanda upprättat med patienter som rapporterat två eller flera självrapporterade symptom.

## Clinical performance<sup>1</sup>

Positive Percent Agreement (PPA)	Negative Percent Agreement (NPA)
<b>91.1%*</b>	<b>99.6%*</b>
(95% Confidence Interval (C.I.), 80.7%-96.1%)	(95% Confidence Interval (C.I.), 97.9%-99.9%)
Positive Predictive Value (PPV)	Negative Predictive Value (NPV)
<b>98.1%*</b>	<b>98.1%*</b>
(95% Confidence Interval (C.I.), 90.7%-99.9%)	(95% Confidence Interval (C.I.), 96.0%-99.4%)

Negativa resultat utesluter inte SARS-CoV-2-infektion och bör inte användas som den enda grunden för beslut om behandling eller patienthantering, inklusive infektionsbeslut. Negativa resultat bör beaktas i samband med en patients senaste exponering, historia och förekomsten av kliniska tecken och symptom som överensstämmer med COVID-19 och bekräftas med en molekylär analys, om det behövs, för patienthantering.



Beställnings information	Cat. no.	Qty.
BD Kit for Rapid Detection of SARS-CoV-2	256091	30 tests

BD, Marieviksgatan 25, 117 43 Stockholm, Sweden

**bd.com**

Unless otherwise indicated, all products are CE-marked in compliance with the European In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC.

BD, the BD Logo and Veritor are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 BD. All rights reserved. BD-29754

